

2023年1月25日 作成(第1版)

類別:機械器具 77 バイブレーター
管理医療機器 一般の名称:家庭用電気マッサージ器(JMDNコード:34662000)
電気マッサージ器 EMK-107

【警告】


人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

- 下記の人は必ず医師と相談のうえ使用してください。
 - ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電子機器を使用している人 ・ 悪性腫瘍のある人
 - 心臓に障害のある人 ・ 妊娠中や出産直後の人
 - 糖尿病などの高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
 - 皮膚に創傷のある人 ・ 安静を必要とする人
 - 体温38℃以上(有熱期)の人(例1:急性炎症症状の強い人(倦怠感、悪寒、血圧変動など) 例2:衰弱しているとき)
 - 骨折しう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性疼痛性疾患の人
 - 背骨に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人
 - 使用しても効果が現れない場合は医師に相談すること
 - 現在、医療機関で治療中の人
- 医師からマッサージを禁じられている人は使用しないでください。
(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)
[症状を悪化させるおそれがあります。]
- ☆使用前には、必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認してください。また、その他の部分にも破れないか確認してください。(どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源アダプターを抜き、修理を依頼してください。)
[けがや感電のおそれがあります。]
- 湿気の多い場所やぬれた身体で使用しないでください。
[感電や故障の原因となります。]
- 使用後は必ず電源アダプターをコンセントから抜いてください。
ホコリや湿気で絶縁劣化による漏電火災の原因になります。
- お手入れの際は、電源アダプターをコンセントから抜いてください。
また、ぬれた手で電源アダプターに触れないでください。
[感電やけがの原因になります。]
- 絶対に分解や修理、改造をしないでください。
[発火や異常動作によるけがをするおそれがあります。]

【禁忌・禁止】

- マッサージ以外の目的に使用しないでください。また、頭へは使用しないでください。
[事故やけがのおそれがあります。]
- 子供や自分で操作できない人に使わせないでください。また、幼児の手の届く範囲では使用しないでください。
[事故やけがのおそれがあります。]
- 本体の上に立って使用しないでください。
[転倒による事故やけがのおそれがあります。]
- 本体内部に金属類や燃えやすいものを入れないでください。
[感電やショート、火災の原因になります。]

【形状・構造及び原理等】

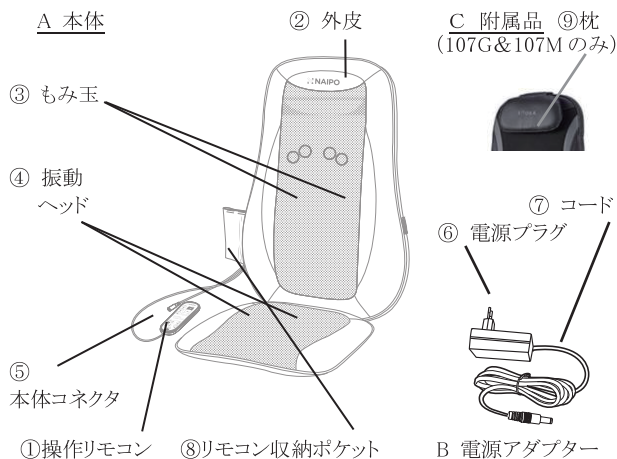

取扱説明書を必ずご参照ください。

(1) 構成

本品はマッサージ器本体及び専用の電源アダプター、で構成される。

番号	No.	構成部品
A 本体	①	操作リモコン
	②	外皮(カバー)
	③	もみ玉(二組4個)
	④	振動ヘッド
	⑤	本体コネクタ
	⑧	リモコン収納ポケット
B 電源 アダプター	⑥	電源プラグ
	⑦	コード
C 附属品	⑨	枕(107G&107Mのみ)

(2) 本体の寸法、重量

寸法 全長: 105cm±15%
幅: 44cm±15%
厚さ: 10cm±15%
重量(本体): 2.5kg±15%

(3) 電氣的定格

定格電圧 : AC100V
定格周波数 : 50 / 60Hz
定格電力 : 24W (加温機能の定格電力6W)
定格時間 : 15分
感電に対する保護 : クラスⅡ

(4) 動作原理

本製品は、ソファや座椅子にセットしてマッサージを行うことができるもので、シート状の背内部に組み込まれたモーターを駆動源とし、ギアにより大小2個一組 計4個のもみ玉が回転するもみ機構ユニットと、これを背枠上下方向に往復移動させるためのラックアンドピニオン機構を備え、もみ玉2個(大)には、加温機能も備えている。さらに座シート内部には、二組のモーターを駆動源とする振動ヘッドを内蔵し、振動マッサージを得ることが出来る。

【使用目的又は効果】

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用する事。

(品目仕様等)

もみ機能 : 36回/分
振動機能 : 3400回/分(H), 3100回/分(M), 2800回/分(L),
施療部移動機能 : 0.7cm/秒
タイマー : 約15分(5分, 10分, 15分の三段階切替)
(その他の機能)
加温機能 (治療器としての温熱効果はない)

【使用方法等】

1. 使用前

- 1.1 使用前にあたって取扱説明書の注意事項などを確認する。
- 1.2 各部に異常がないかを確認する。
- 1.3 付属の電源アダプターを本体コネクタに接続し、プラグをコンセントにしっかり差し込む。
付属の電源アダプター (IVP1200-2000P) を使用すること。
- 1.4 使用の際に、椅子の背もたれに立てかけた際に、本体を固定するためのゴムベルトで、マジックファスナーにより椅子に取り付ける。あくまで、使用中の椅子の背もたれからのずり落ち防止のための補助的なベルトである。

2. 使用中

2.1 使用方法

使用者は施療部に患部に接触させたままマッサージを行う。使用者の姿勢に応じて使用することが出来る。(頭部には使用しないこと)

2.2 マッサージ動作

本体を座椅子やソファに置き、その上に座る。
リモコンの電源ボタンを押し、動作を開始する。
“上部” “下部” “全身” を選択し、施療部位を決定する。
“ヒーター” ボタンでもみ玉ヒーターの入り切り選択する。
“振動” ボタンで座の振動を ON/OFF する。 ボタンを順次押すことで振動の強さを“L・M・H”(弱・中・強)と可変できる。
“タイマー” ボタンでタイマー時間を選択する。(5分・10分・15分)

“自動”ボタンで自動コースを選択できる。

3. 使用後

- 3.1 タイマーにより電源が切れる。または電源ボタンを押す。
- 3.2 電源アダプターをコンセントから抜く
- 3.3 電源アダプターのコードを本体コネクタから抜く

【使用上の注意】

- 表面が熱くなるため、熱に敏感な人は十分注意を払って使用する。
- 使用例を参考に使用する。無理な姿勢で使用しない。誤った使用による事故やけがの恐れがあります。
- 取り扱いを間違えると不具合を生じることがあります。取扱説明書の安全上のご注意および使用方法を厳守してお使いください。
- 交流 100V 以外の電源は使用しないでください。感電や火災の原因になります。
- 1 回の使用時間は 15 分以内にしてください。また一箇所の連続使用は 3 分以内にしてください。逆効果やけがのおそれがあります。
- 使用中に、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。
- プラグを抜くときはコードを持たず、必ず電源アダプターを持って抜いてください。感電やショートのおそれがあります。
- 故障が発見された場合は使用をただちに中止して電源を切り、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理を依頼してください。感電やショート、火災の原因になります。
- 次のようなときは使用しないでください。
 - ・ 疲労が激しいとき
 - ・ 酒に酔っているとき
 - ・ 湿疹が生じているとき体調不良をおこすおそれがあります。
- 使い始めは弱い刺激でマッサージを行って下さい。強く押しつけて使用しないでください。
- フトンの中や、毛布をかぶせて使用しないでください。火災やモーターの温度上昇の原因になります。
- 食前、食後の 1 時間は使用しないでください。体調不良を起こすおそれがあります。
- 素肌のままで使用しないでください。けがのおそれがあります。
- 他の治療器具と同時に使用しないでください。体調不良を起こすおそれがあります。
- コードや電源アダプターが破損したり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電やショート、火災の原因になります。
- アクセサリーなどの硬いものをつけて使用しないでください。機構部に接触してけがのおそれがあります。
- 落したり、強い衝撃をあたえないでください。感電やショート、火災の原因になります。
- 二人以上で同時に使用しないでください。事故やけがのおそれがあります。
- ご使用の際は、固定用ベルトをしっかりと固定してください。固定できない場合は、奥行きのある座面を用いた椅子などで使用し、深く腰がけ、ご使用下さい。機器が滑り、落ちる可能性があります。
- 停電のときは電源アダプターをコンセントから抜いてください。停電復帰時に事故やけがのおそれがあります。
- お手入れは本体を乾いた布で汚れをふき取ってください。
- お手入れの際は、電源アダプターをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源アダプターに触れないでください。感電ややけどの原因になります。
- お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。変色、変形の原因になります。
- 本品を廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めに従ってください。
- 付属の専用電源アダプター以外は使用しないでください。
- 操作ボタン、タイマーなどが正常に作動するか確認してください。
- しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。

【保管方法及び有効期間等】

- 電源アダプターのコードを本体コネクタから抜き、プラグをコンセントから抜いてください。
- 汚れホコリをとったあと、湿気の少ない所に保管してください。

【保守・点検に係る事項】

- 故障が発見された場合はお買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理を依頼してください。
- 分解や改造をしないでください。

(包装)

最小包装単位: 1 個 / 箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 製造販売業者
株式会社 NAIPO CARE JAPAN
大阪府大阪市中央区北浜東 1 番 1 2 号天満橋フジタビル 8 階
電話: 06-6484-9956
- 製造業者
XIAMEN EMOKA HEALTH SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD
シャーマンエモカヘルスサイエンスアンドテクノロジー
国名: 中華人民共和国

取扱説明書を必ずご参照ください。